

Instruções para pedido de exames para pesquisa de Febre Amarela

<p>FEBRE AMARELA (Médico deve preencher ficha SINAN)</p>	<p>Exames: • Sorologia - MAC-ELISA; • Isolamento viral e Biologia Molecular</p> <p>Formulário/Pedido: Ficha SINAN preenchida e impresso laboratorial comum.</p> <hr/> <p>Amostra biológica: sangue</p> <p>Período de Coleta:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Sorologia</u>: a partir do 6º (sexto) dia após o início dos sintomas;• <u>Isolamento viral e Biologia Molecular</u>: do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) dia após o aparecimento dos primeiros sintomas. <hr/> <p>Armazenamento no Laboratório:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Sorologia</u>: Aguardar o sangue coagular para separar o soro por centrifugação, deixar o tubo com sangue total em geladeira (2 a 8° C) por um período máximo de 24h. Não se deve congelar o sangue total, nem encostar o frasco diretamente no gelo reciclável para evitar hemólise• <u>Biologia Molecular (PCR)</u>: centrifugar a amostra até 2 horas após coleta, separar soro em criotubo, identificar e armazenar em freezer -70°C ou nitrogênio líquido. <hr/> <p>Transporte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Em caixa térmica de transporte com gelo reciclável, amostras identificadas em sacos plásticos.
--	--

Obs: Em caso do óbito verificar instruções de investigações de óbito