

### Instruções para pedido de exames para pesquisa de Leishmaniose Visceral Humana

**LEISHMANIOSE  
VISCERAL  
HUMANA**  
(Médico deve  
preencher ficha  
SINAN)

**Exames:** • Sorológicos: Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e Teste rápido por imunocromatografia;  
• Parasitológico direto em lâminas;  
• Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).

**Formulário/Pedido:** Ficha SINAN preenchida e impresso laboratorial comum.

---

**Amostra biológica:** • Soro: RIFI e teste rápido imunocromatográfico;  
• Lâminas com esfregaço de aspirado de medula óssea ou cortes histológicos: Parasitológico direto em lâminas;  
• Sangue total conservado em EDTA: PCR.

**Volume ideal:** • Soro: 2mL  
• Parasitológico: 3 lâminas;  
• PCR: 3 a 5 mL de sangue total ou aspirado de medula armazenados em tubos com EDTA.

**Período de Coleta:** A partir da suspeita clínica

---

**Armazenamento no Laboratório:**

• Lâminas: as lâminas devidamente identificadas e secas devem ser enviadas sem o uso do fixador (metanol absoluto) em até 24 horas;

• Sangue total: as amostras deverão ser enviadas no prazo máximo de cinco dias após a coleta e deverão ser conservadas em temperatura de 2° a 8°C;

• Soro: as amostras devem ser enviadas no prazo máximo de cinco dias após a coleta e deverão ser conservadas em temperatura de 2° a 8°C. As amostras enviadas após cinco dias da coleta deverão ser conservadas a -20°C.

---

**Transporte:**

• Em caixa térmica de transporte com gelo reciclável, amostras identificadas em sacos plásticos.

Obs: Em caso de óbito verificar instruções de investigações de óbito